


ASYA

ORİJİNAL POMPA SETLERİ



*Güvenli Tedavi için
Tüm Servislere Uyumlu Sistem*

Tek kullanımlık, steril ve güvenli infüzyon için tasarlanmıştır.

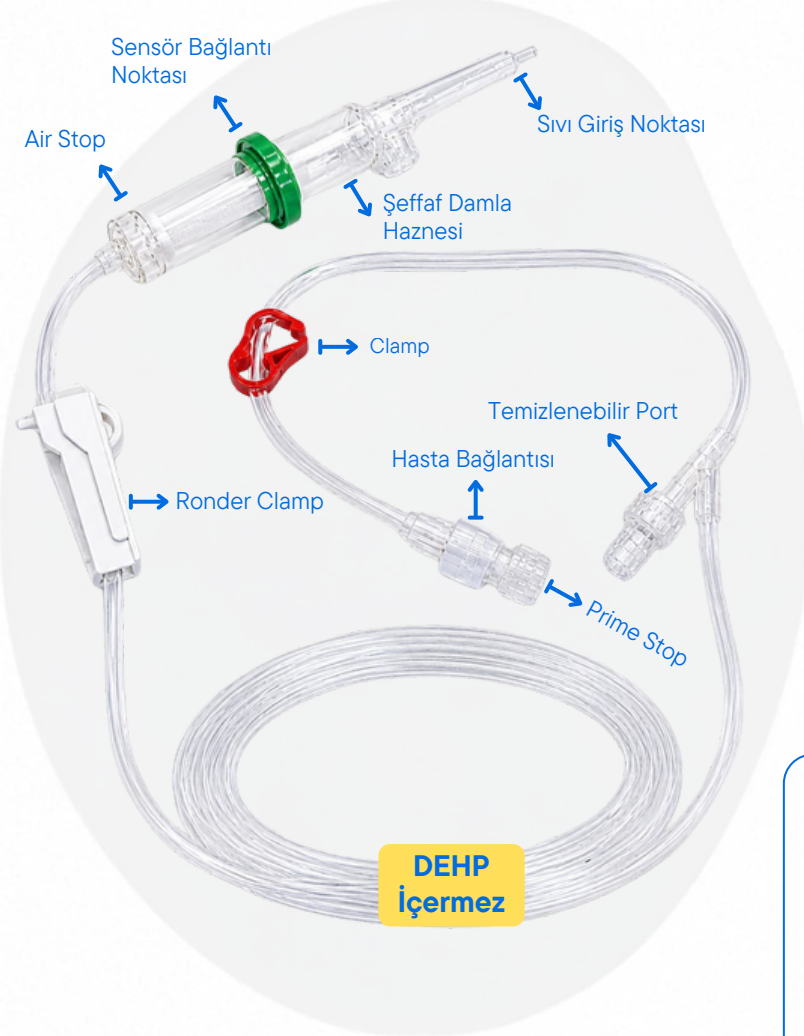

Ürün Kodu: 429180 TR

Öne Çıkan Özellikler

Y-site

İğnesiz Enjeksiyon Portu / Y-site

Temizlenebilir port

Hijyenik kullanım.

Şeffaf damlalık haznesi

Damlaların net izlenebilirliği.

Steril ve tek kullanımlık

Güvenli hasta kullanımı için idealdir.

Birleşenler

Damlalık Haznesi	PS
Filtre Gövdesi	15 µm Entegre Filtre
Tüp	(DEHP içermez)
Roller Clamp	PP
Spike	Sıvı Giriş Noktası
Filtre Elemanı	Polyester Mesh
Lateks	İçermez


Teknik Özellikler

Damla Faktörü	20 damla
Priming Hacmi	23.4 mL
Sterilizasyon	Etilen Oksit (EO) ile sterilize edilmiştir
Tüp Malzemesi	PVC
Dış Çap	4.1 mm
İç Çap	3.0 mm
Uzunluk	250 cm
Kutu Adedi	100

Kullanım Şekli:

- Ambalajın zarar görmemiş olmasına dikkat edin.
- Ambalajı üzerindeki açma noktasından açın.
- Damlalık haznesinin sivri kısmını infüzyon kabına sabitleyin.
- Setin dolumunu manuel olarak veya cihaza yerleştirdikten sonra gerçekleştirin.
- Dolum esnasında güvenliğinizi için Prime Stop çıkarmayın.
- Dolum sonrası seti cihaza yerleştirin.
- Prime Stop çıkarılarak hasta bağlantısını sağlayın.

Tek kullanımlık, Steril ve güvenli, ışıktan korumalı infüzyon için tasarlanmıştır.

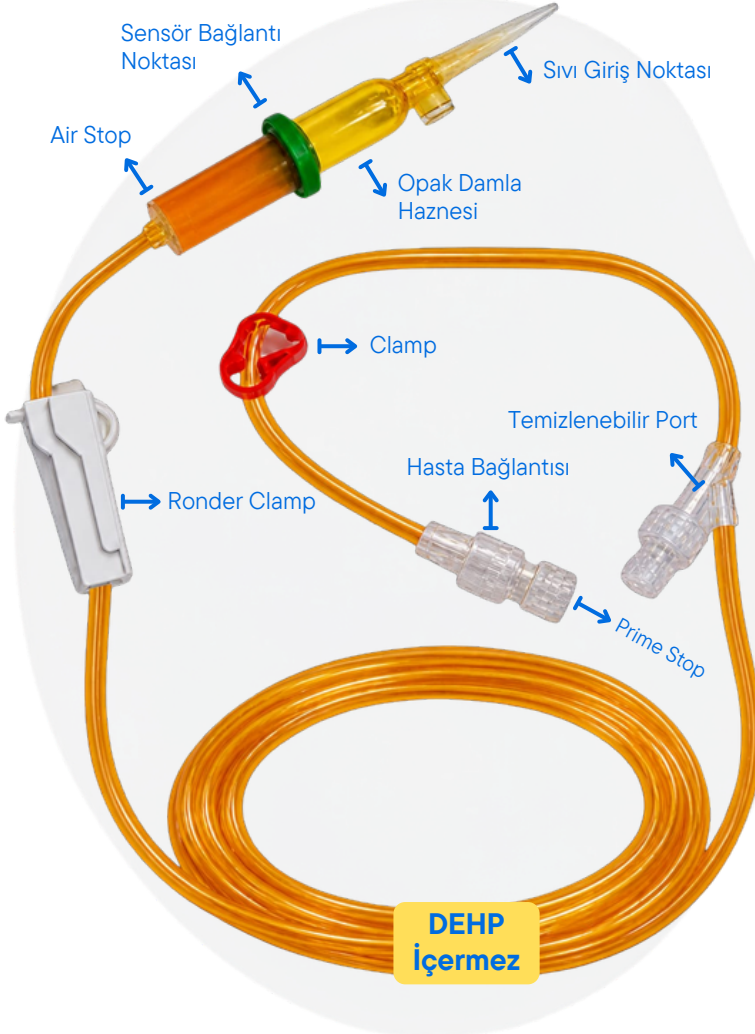

Ürün Kodu: 429190 TR

Öne Çıkan Özellikler

Y-site

İğnesiz Enjeksiyon Portu / Y-site

Temizlenebilir port

Hijyenik kullanım.

Opak damlalık haznesi

Damlaların net izlenebilirliği.

Steril ve tek kullanımlık

Güvenli hasta kullanımı için idealdir.

Birleşenler

Damlalık Haznesi	PS
Filtre Gövdesi	15 µm Entegre Filtre
Tüp	(Işık Korumalı / DEHP içermez)
Roller Clamp	PP
Spike	Sıvı Giriş Noktası
Filtre Elemanı	Polyester Mesh
Lateks	İçermez

Teknik Özellikler


Damla Faktörü	20 damla
Priming Hacmi	23.4 mL
Sterilizasyon	Etilen Oksit (EO) ile sterilize edilmiştir
Tüp Malzemesi	PVC İçermez
Dış Çap	4.1 mm
İç Çap	3.0 mm
Uzunluk	250 cm
Kutu Adedi	100

Kullanım Şekli:

- Ambalajın zarar görmemiş olmasına dikkat edin.
- Ambalajı üzerindeki açma noktasından açın.
- Damlalık haznesinin sivri kısmını infüzyon kabına sabitleyin.
- Setin dolumunu manuel olarak veya cihaza yerleştirdikten sonra gerçekleştirin.
- Dolum esnasında güvenliğinizi için Prime Stop çıkarmayın.
- Dolum sonrası seti cihaza yerleştirin.
- Prime Stop çıkarılarak hasta bağlantısını sağlayın.

ASYA İNFÜZYON POMPA SETİ (KAPALI SİSTEM)

Tek kullanımlık, steril ve güvenli standart infüzyon için tasarlanmıştır.

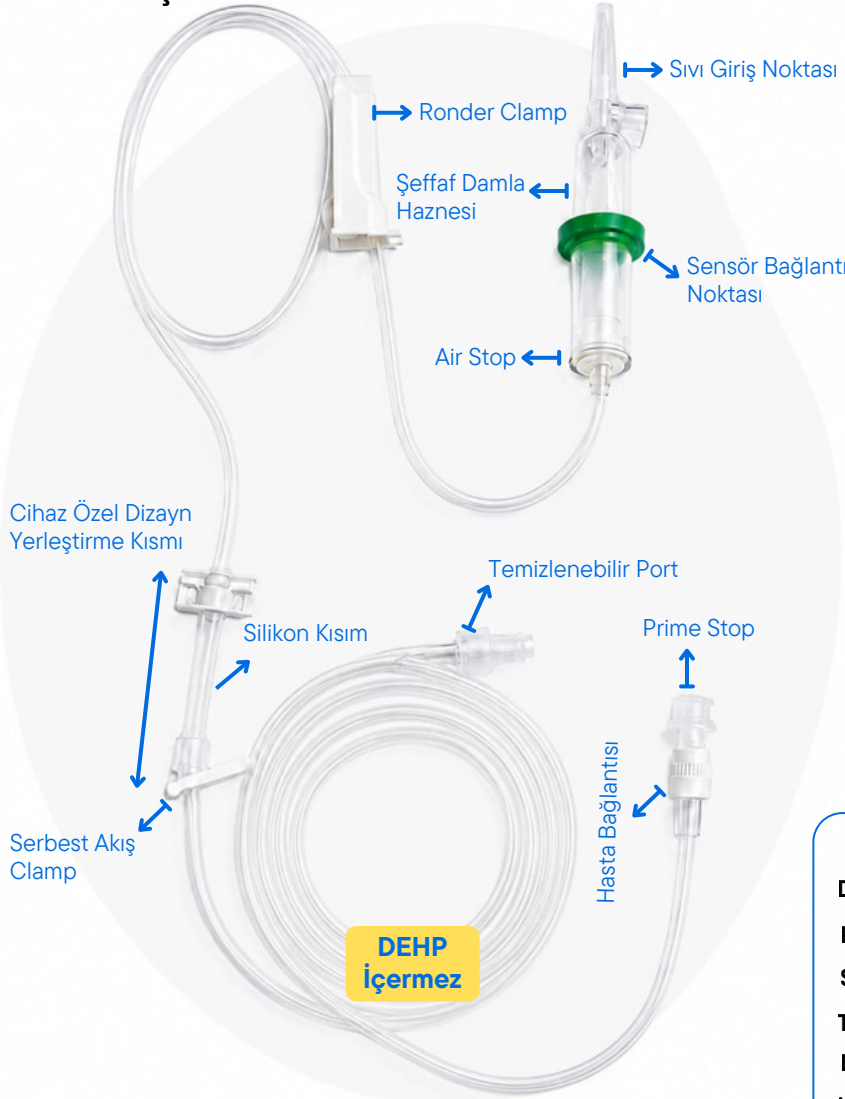

Ürün Kodu: 429210 TR

Öne Çıkan Özellikler

Y-site

İğnesiz Enjeksiyon Portu / Y-site

Temizlenebilir port

Hijyenik kullanım.

Şeffaf damlalık haznesi

Damlaların net izlenebilirliği.

Steril ve tek kullanımlık

Güvenli hasta kullanımı için idealdir.

Birleşenler

Damlalık Haznesi	PS
Filtre Gövdesi	15 µm Entegre Filtre
Tüp	(DEHP içermez)
Roller Clamp	PP
Spike	Sıvı Giriş Noktası
Filtre Elemanı	Polyester Mesh
Lateks	İçermez

Teknik Özellikler

Damla Faktörü	20 damla
Priming Hacmi	26.9 mL
Sterilizasyon	Etilen Oksit (EO) ile sterilize edilmiştir
Tüp Malzemesi	PVC
Dış Çap	4.1 mm
İç Çap	3.0 mm
Uzunluk	300 cm
Kutu Adedi	100

Kullanım Şekli:

- Ambalajın zarar görmemiş olmasına dikkat edin.
- Ambalajı üzerindeki açma noktasından açın.
- Damlalık haznesinin sivri kısmını infüzyon kabına sabitleyin.
- Setin dolumunu manuel olarak veya cihaza yerleştirdikten sonra gerçekleştirin.
- Dolum esnasında güvenliğinizi için Prime Stop çıkarmayın.
- Dolum sonrası seti cihaza yerleştirin.
- Prime Stop çıkarılarak hasta bağlantısını sağlayın.

ASYA İNFÜZYON POMPA SETİ (KAPALI SİSTEM)

Tek kullanımlık, steril ve güvenli kan verme için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

Y-site

İğnesiz Enjeksiyon Portu / Y-site

Temizlenebilir port

Hijyenik kullanım.

Şeffaf damlalık haznesi

Damlaların net izlenebilirliği.

Steril ve tek kullanımlık


Güvenli hasta kullanımı için idealdir.

Birleşenler

Damlalık Haznesi	PS -15 µm Entegre Filtre
Filtre Gövdesi	200 µm Entegre Filtre
Tüp	(DEHP içermez)
Roller Clamp	PP
Spike	Sıvı Giriş Noktası
Filtre Elemanı	Polyester Mesh
Lateks	İçermez

Teknik Özellikler

Damla Faktörü	20 damla
Priming Hacmi	23.4 mL
Sterilizasyon	Etilen Oksit (EO) ile sterilize edilmiştir
Tüp Malzemesi	PVC
Dış Çap	4.1 mm
İç Çap	3.0 mm
Uzunluk	250 cm
Kutu Adedi	100

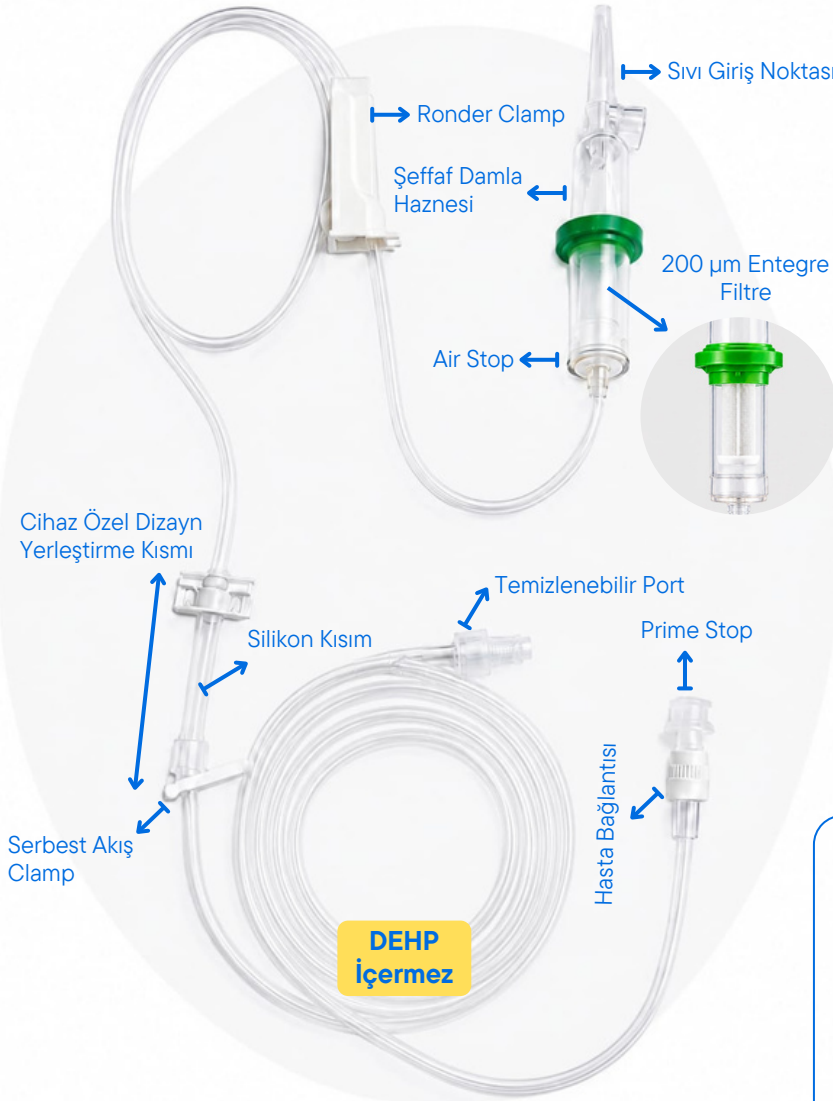


Ürün Kodu: 430170 TR

Kullanım Şekli:

- Ambalajın zarar görmemiş olmasına dikkat edin.
- Ambalajı üzerindeki açma noktasından açın.
- Damlalık haznesinin sivri kısmını infüzyon kabına sabitleyin.
- Setin dolumunu manuel olarak veya cihaza yerleştirdikten sonra gerçekleştirin.
- Dolum esnasında güvenliğinizi için Prime Stop çıkarmayın.
- Dolum sonrası seti cihaza yerleştirin.
- Prime Stop çıkarılarak hasta bağlantısını sağlayın.

Tek kullanımlık, steril ve güvenli ışıktan korumalı infüzyon için tasarlanmıştır.

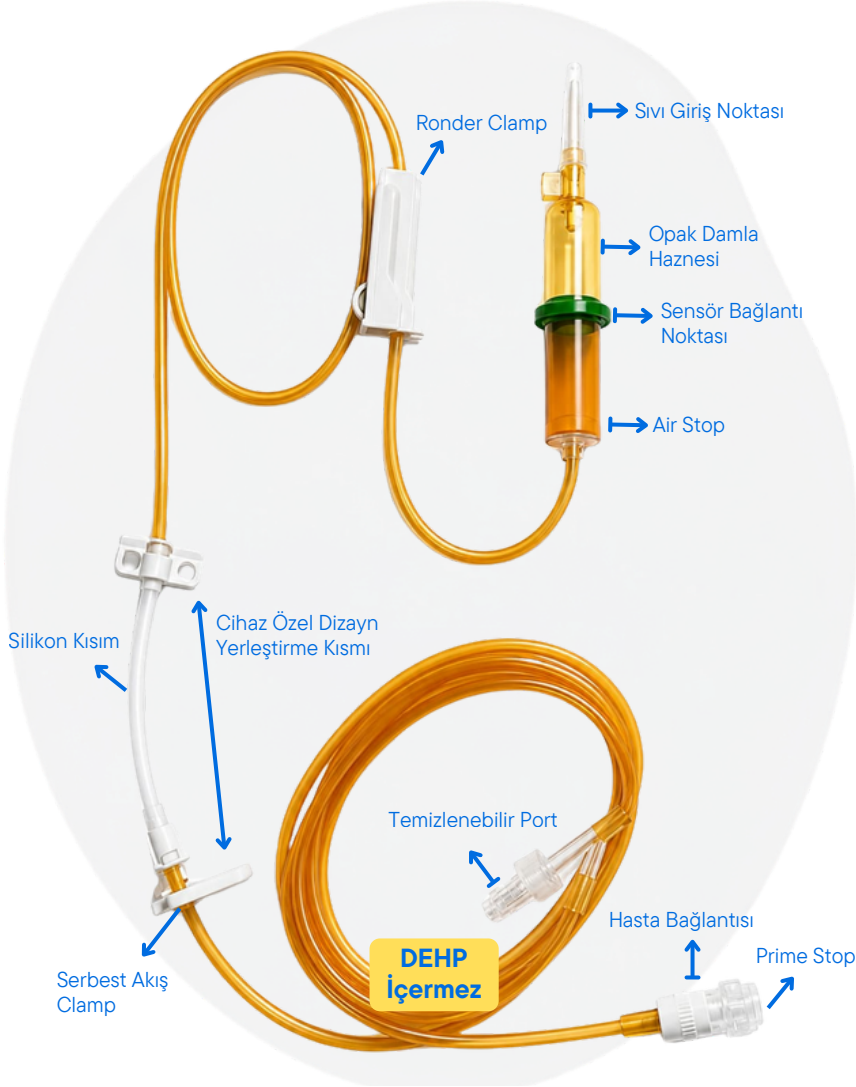

Ürün Kodu: 429200 TR

Öne Çıkan Özellikler

Y-site

İğnesiz Enjeksiyon Portu / Y-site

Temizlenebilir port

Hijyenik kullanım.

Opak damlalık haznesi

Damlaların net izlenebilirliği.

Steril ve tek kullanımlık

Güvenli hasta kullanımı için idealdir.

Birleşenler

Damlalık Haznesi	PS
Filtre Gövdesi	15 µm Entegre Filtre
Tüp	(Işık Korumalı / DEHP içermez)
Roller Clamp	PP
Spike	Sıvı Giriş Noktası
Filtre Elemanı	Polyester Mesh
Lateks	İçermez


Teknik Özellikler

Damla Faktörü	20 damla
Priming Hacmi	23.4 mL
Sterilizasyon	Etilen Oksit (EO) ile sterilize edilmiştir
Tüp Malzemesi	PVC İçermez
Dış Çap	4.1 mm
İç Çap	3.0 mm
Uzunluk	250 cm
Kutu Adedi	100

Kullanım Şekli:

- Ambalajın zarar görmemiş olmasına dikkat edin.
- Ambalajı üzerindeki açma noktasından açın.
- Damlalık haznesinin sivri kısmını infüzyon kabına sabitleyin.
- Setin dolumunu manuel olarak veya cihaza yerleştirdikten sonra gerçekleştirin.
- Dolum esnasında güvenliğinizi için Prime Stop çıkarmayın.
- Dolum sonrası seti cihaza yerleştirin.
- Prime Stop çıkarılarak hasta bağlantısını sağlayın.


Tek kullanımlık, steril ve güvenli uzatma hattı, perfüzör pompaları için (ışıkta korumalı ve şeffaf) olarak tasarlanmıştır.

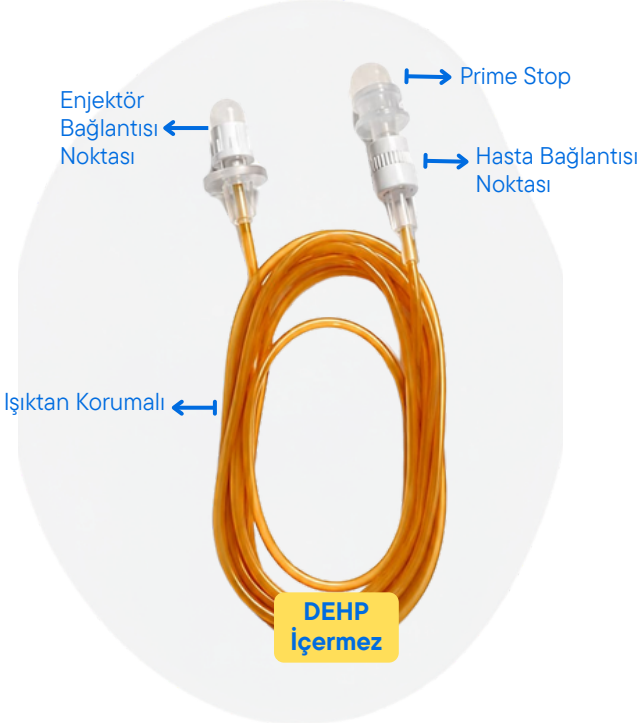

Teknik Özellikler

Priming Hacmi	1.5 mL
Sterilizasyon	Etilen Oksit (EO) ile sterilize edilmiştir
Tüp Malzemesi	PVC (DEHP içermez)
Dış Çap	2.7 ml
İç Çap	1.5 ml / PE
Uzunluk	150 cm
Kutu Adedi	100

Ürün Kodu: 429230 TR

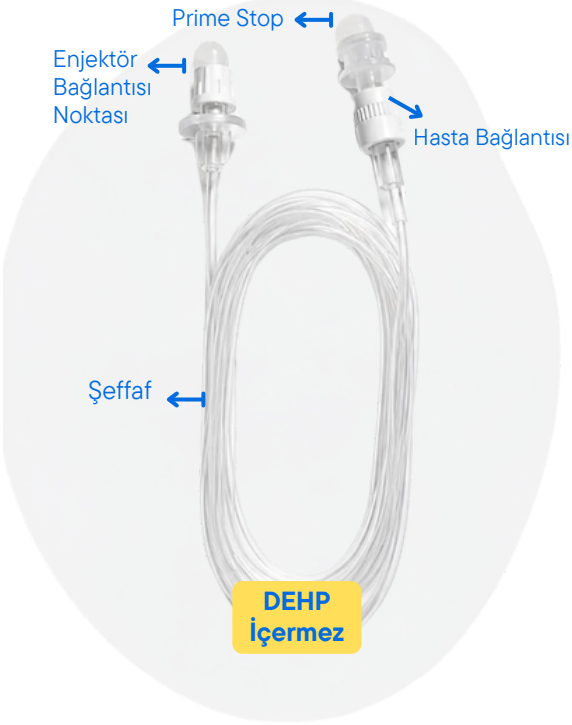

Kullanım Şekli:


- Ambalajın zarar görmemiş olmasına dikkat edin.
- Ambalaj üzerindeki açma noktasından açın.
- Enjektöre sıvı dolumunu yapın.
- Line'ın luer kısmını enjektör Luer kısmı ile birleştirin.
- Line üzerinde sıvı çıkış noktasında, Prime stop bulunduğu Line'ın dolumunu güvenli bir şekilde gerçekleştirin.
- Cihaz ve Hasta bağlantısını gerçekleştirin.
- Güvenli bir şekilde tedaviye başlayın.

Ürün Kodu: 429220 TR

ASYA

ORİJİNAL

POMPA SETLERİ

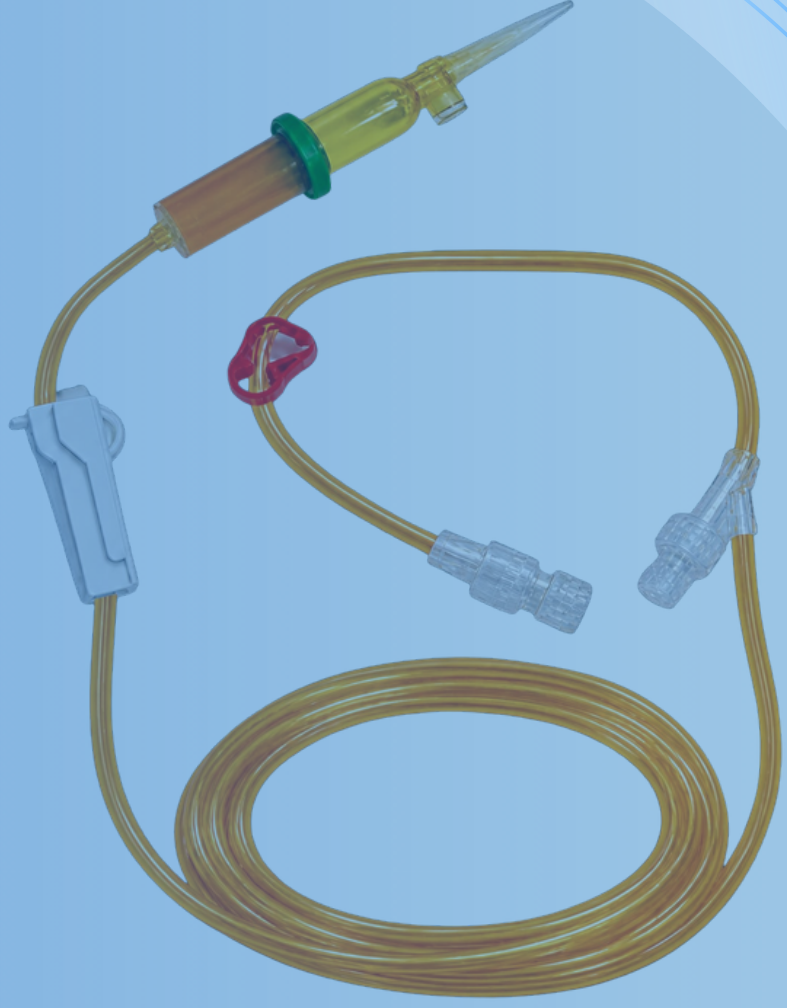

+90 (212) 635 57 35



asyamedikal@msn.com



www.asyamedikal.tr



Molla Gürani Mah. Softa Sinan Sok. No: 22/A
FINDIKZADE / İSTANBUL

